

ノロウイルスG I 検出試薬キット ノロウイルスG II 検出試薬キット



●ノロウイルスRNAをRT-LAMP反応で検出

ノロウイルスgenome RNAをサンプルとし、逆転写酵素によりcDNAを合成するRT反応と、cDNAからの増幅反応を1ステップで行うことができるRT-LAMPで検出します。

●ノロウイルスGenogroup I (G I) とII (G II) を特異的かつ迅速に検出

ノロウイルスgenome RNA内の保存性の高い領域に対し設計した、G I、G IIのそれぞれに特異的なプライマーを使用しています。また、増幅効率が高いLAMP法により、反応は1時間で終了します。

●リアルタイム濁度測定装置で増幅から検出を1つのチューブで完了

専用の「Loopamp リアルタイム濁度測定装置」を用いて、増幅から検出までをワンステップで行うことができます。また、電気泳動での検出を必要としないため1つのチューブで完了します。

ノロウイルスGⅠ 検出試薬キット/ノロウイルスGⅡ 検出試薬キット

Norovirus GⅠ Detection Kit / Norovirus GⅡ Detection Kit

●本キットの製品概要

ノロウイルスは12～3月をピークに流行する急性胃腸炎の1つで、主症状として嘔気、嘔吐、下痢があり、まれに重症化し死亡する例も報告されます。厚生労働省の食中毒統計(2024年)によると、ノロウイルスの発生件数は第2位、患者数は第1位です。感染は主としてカキに代表される2枚貝の生食によるものと考えられていましたが、100個以下のウイルス量でも感染することから、最近ではノロウイルスに感染している食品従事者が、調理過程において食品を汚染したと推定される食中毒事例が増加しています。厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル」(最終改正:平成29年6月16日)において、調理従事者等は10月から3月までの間には月に1回以上又は必要に応じてノロウイルスの検便検査に努めるよう記載されており、また、遺伝子型によらず概ね便1 g当たり 10^5 オーダーのノロウイルスを検出できる検査法を用いることが望ましいとされています。

Loopamp ノロウイルスGⅠ 検出試薬キットはGenogroupⅠ(GⅠ) genome RNA、Loopamp ノロウイルスGⅡ 検出試薬キットはGenogroupⅡ(GⅡ) genome RNA内の保存性の高い領域の核酸配列を認識するプライマーを用いて核酸の増幅反応を行い、その増幅の有無からそれぞれのノロウイルスGⅠおよびGⅡの有無を判定します。

核酸増幅の検出は、反応副産物であるピロリン酸マグネシウム(白色沈殿物質)による濁度の増加を測定することによって行います。濁度測定には専用の「Loopamp リアルタイム濁度測定装置」を用います。

●キット構成

ノロウイルスGⅠ 検出試薬キット

[1]2x Reaction Mix. NV1(RM NV1)	0.6 mL × 1 tube
[2]Primer Mix. NG1(PM NG1)	0.12 mL × 1 tube
[3]Distilled Water (DW)	1.0 mL × 1 tube
[4]Enzyme Mix. (EM)	50 μ L × 1 tube
[5]Positive Control NVG1 (PC NVG1)	0.1 mL × 1 tube


ノロウイルスGⅡ 検出試薬キット

[1]2x Reaction Mix. NV(RM NV)	0.6 mL × 1 tube
[2]Primer Mix. NVG2(PM NVG2)	0.12 mL × 1 tube
[3]Distilled Water (DW)	1.0 mL × 1 tube
[4]Enzyme Mix. (EM)	50 μ L × 1 tube
[5]Positive Control NVG2 (PC NVG2)	0.1 mL × 1 tube

()内は、試薬チューブに記載されている表示です。

●操作手順

※ LAMP反応前の試薬キットの操作については、氷上で実施すること。

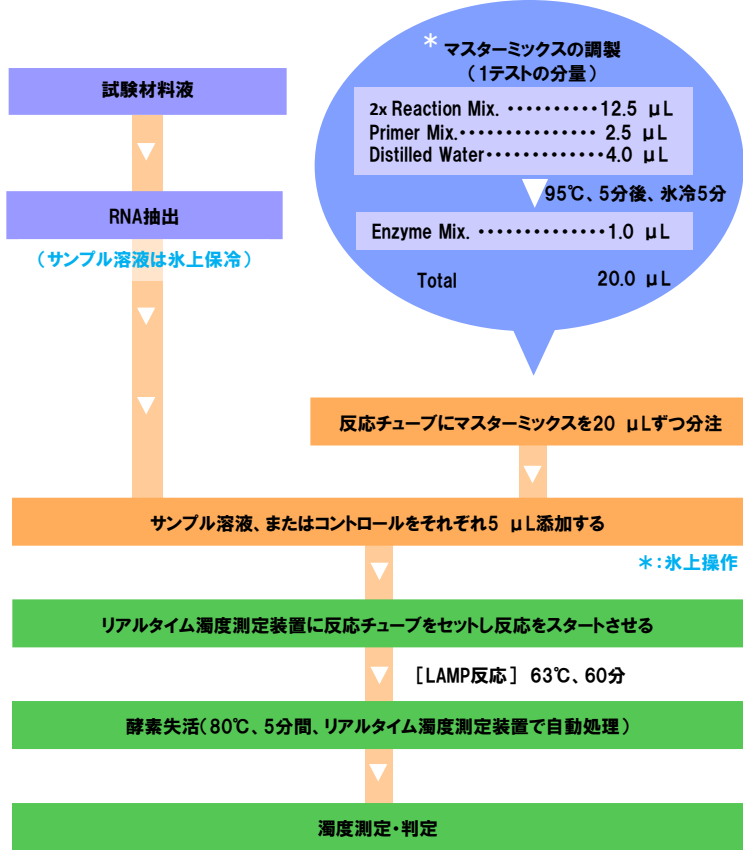

※使用上又は取扱い上の注意については、使用説明書をご参照ください。

※Loopamp リアルタイム濁度測定装置に関する内容は

Eiken GENOME SITE (<https://loopamp.eiken.co.jp/>)をご覧ください。

※本キットに使用する反応チューブは、必ず専用の「Loopamp 反応チューブD」をご使用ください。

●貯蔵方法・包装単位・有効期間・製品コード

製品名	包装単位	貯蔵方法	有効期間	製品コード
Loopamp ノロウイルスGⅠ 検出試薬キット	48テスト分	－20℃	1年間	LMP301
Loopamp ノロウイルスGⅡ 検出試薬キット	48テスト分	－20℃	1年間	LMP302

(別売) 反応チューブ

製品名	包装単位	貯蔵方法	有効期間	製品コード
Loopamp 反応チューブD	8 × 12 sets	室温保存	36カ月	LMP906
	8 × 120 sets			LMP907

注)本キットは臨床診断の目的では使用できません。

本キットは定性検出キットであり、定量測定目的に開発されたものではありません。